



# ialuset®



**FERITE e USTIONI NON INFETTE**

## PROPRIETÀ

**ialuset®** contiene acido ialuronico (sale sodico).

L'acido ialuronico è il principale componente della sostanza fondamentale del derma.

Grazie al suo peculiare potere igroscopico, in presenza di lesioni cutanee contribuisce a mantenere il giusto grado di idratazione del derma.

Esso agisce inoltre come coadiuvante nei processi di rigenerazione tissutale delle lesioni cutanee, promuovendo il microambiente della ferita favorevole alla cicatrizzazione e alla riepitelizzazione.

## INDICAZIONI

**ialuset® crema** è indicato nel trattamento di ferite e ustioni non infette, con o senza essudato, ulcere delle gambe, incluse quelle di origine venosa, ragadi, fistole, piaghe da decubito, ferite post-operatorie, dermatopie abrasive ed escoriazioni di origine chimico-fisica.

## COMPOSIZIONE

Acido ialuronico (sale sodico) 0,2%, cetearil glucoside, acido oleico decilestere, alcol cetearilico, sodio laurilsolfato, sodio cetearilsolfato, glicerina pura anidra, sorbitolo 70%, acido sorbico, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, citrato sodico biidrato, acqua deionizzata.

## FORME E PRESENTAZIONI

Tubo da 25 g

## VIA DI SOMMINISTRAZIONE E POSOLOGIA

Pulire accuratamente la ferita prima di ogni applicazione, quindi procedere come descritto di seguito.

Applicare uno strato dello spessore di circa 2-3 mm di crema direttamente sulla ferita, oppure stendere la crema su una garza sterile e applicarla sulla ferita.

La garza può essere mantenuta in posizione con un appropriato bendaggio.

Applicare la crema ogni 24 ore sino a completa cicatrizzazione.

**L'avvenuta cicatrizzazione della ferita deve essere valutata da un medico.**

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO

Tubo: stringere accuratamente il tappo a vite per chiudere il tubo dopo ogni utilizzo.

Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore ai 50°C.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Non fumare.

Seguire le procedure appropriate per la pulizia e la disinfezione delle ferite, ustioni e delle aree cutanee adiacenti.

La crema rimasta sulla ferita dalla applicazione precedente può essere facilmente rimossa con acqua prima di ogni applicazione successiva.

L'avvenuta cicatrizzazione della ferita deve essere valutata da un medico.

L'impiego di **ialuset®** sulle ulcere venose non preclude l'uso di un trattamento di compressione (calze o bendaggi).

Non usare **ialuset®** se il confezionamento risulta danneggiato.

In caso di qualsiasi dubbio sull'utilizzo di **ialuset®** consulti il suo medico o il farmacista.

Solo per uso esterno.

Non ingerire.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

## CONTROINDICAZIONI

**ialuset®** non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota all'acido ialuronico (sale sodico) o ad uno o più degli altri componenti.

## EFFETTI INDESIDERATI

Reazioni locali di ipersensibilità come eczema, sono state raramente osservate.

SE NOTA LA COMPARSA DI UN EFFETTO INDESIDERATO CHE NON SIA MENZIONATO IN QUESTO FOGLIO ILLUSTRATIVO, CHIEDA CONSIGLIO AL SUO MEDICO O FARMACISTA.

## CONSERVAZIONE

NON USARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.

Questo dispositivo medico deve essere conservato a temperature inferiori a 25°C.

Validità: 36 mesi.

La data di scadenza indica la validità massima del dispositivo medico.

Anno di certificazione CE: 2012

Data ultima revisione foglietto illustrativo: Giugno 2020

### Fabbricante:

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l

Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – Italy

e-mail: info@ibsa.it | [www.ibsa.it](http://www.ibsa.it)



Proteggere dai raggi solari



Lotto

CE 0051



Verdere le istruzioni per l'uso



Utilizzare entro il



Non esporre a temperature superiori a 25°C



Non usare se la confezione è danneggiata

Scopri la  
linea **ialuset®**



Scopri di più su [www.ialuset.it](http://www.ialuset.it)  
oppure scannerizza il QR code

