



Ialuset®
Garze Impregnate
acido ialuronico 0,05%
Sterile

PROPRIETA':

Ialuset® contiene acido ialuronico (sale sodico).

L'acido ialuronico è il principale componente della sostanza fondamentale del derma.

Grazie al suo peculiare potere igroscopico, in presenza di lesioni cutanee contribuisce a mantenere il giusto grado di idratazione del derma.

Esso agisce inoltre come coadiuvante nei processi di rigenerazione tissutale delle lesioni cutanee, promuovendo il microambiente della ferita favorevole alla cicatrizzazione e alla riepitelizzazione.

INDICAZIONI:

Ialuset® è indicato nel trattamento di ferite e ustioni non infette, con o senza essudato, ulcere delle gambe, incluse quelle di origine venosa, ragadi, fistole, piaghe da decubito, ferite post-operatorie, dermopatie abrasive ed escoriazioni di origine chimico-fisica.

COMPOSIZIONE:

Ogni garza è impregnata con 4 g di crema contenente: acido ialuronico (sale sodico) 0,05%, glicerina pura anidra, polietilenglicole 4000, acqua deionizzata.

FORME E PRESENTAZIONI:

Astucci da 3 o 10 garze (10 cm x 10 cm).

VIA DI SOMMINISTRAZIONE E POSOLOGIA:

Pulire accuratamente la ferita prima di ogni applicazione, quindi procedere come descritto di seguito.

Aprire la busta in cui è contenuta la garza e dopo aver rimosso i due fogli protettivi, applicare la garza sulla ferita.

Tale medicazione può essere mantenuta in posizione con un appropriato bendaggio.

Applicare la garza ogni 24 ore sino a completa cicatrizzazione.

L'avvenuta cicatrizzazione della ferita deve essere valutata da un medico.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO

Ialuset® Garze è previsto solo per il monouso.

Ialuset® Garze è sterile. Non sterilizzare nuovamente.

Non riutilizzare Ialuset® Garze per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Seguire le procedure appropriate per la pulizia e la disinfezione delle ferite, ustioni e delle aree cutanee adiacenti.



Rev.00 F.I. Ialuset® garze - Giugno 2020

La crema rimasta sulla ferita dalla applicazione precedente può essere facilmente deteresa con acqua prima di ogni applicazione successiva.

L'avvenuta cicatrizzazione della ferita deve essere valutata da un medico.

L'impiego di Ialuset® Garze sulle ulcere venose non preclude l'uso di un trattamento di compressione (calze o bendaggi).

Non usare Ialuset® Garze se il confezionamento risulta danneggiato.

In caso di qualsiasi dubbio sull'utilizzo di Ialuset® consulti il suo medico o il farmacista

Solo per uso esterno.

Non ingerire.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONTROINDICAZIONI:

Ialuset® Garze non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota all'acido ialuronico (sale sodico) o ad uno o più degli altri componenti.

EFFETTI INDESIDERATI

Reazioni locali di ipersensibilità come eczema, sono state raramente osservate.

SE NOTA LA COMPARSА DI UN EFFETTO INDESIDERATO CHE NON SIA MENZIONATO IN QUESTO FOGLIO ILLUSTRATIVO, CHIEDA CONSIGLIO AL SUO MEDICO O FARMACISTA.

CONSERVAZIONE:

NON USARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.

Questo dispositivo medico deve essere conservato a temperature inferiori a 25° C.

Anno di certificazione CE: 2012

Validità: 36 mesi.

La data di scadenza indica la validità massima del dispositivo medico



FABBRICANTE:

IBSA Farmaceutici Italia srl

Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi - ITALY

e-mail: info@ibsa.it

DISTRIBUTORE:


(Nome ed indirizzo del distributore)



Monouso



Vedere le istruzioni per
l'uso

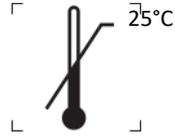


Non esporre a temperature
superiori a 25°C



Lotto



Utilizzare entro il

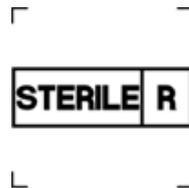

Sterile per irraggiamento



Non usare se la confezione è danneggiata